



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Dilatateur de veine



Guide d'introduction de cathéter en forme de crosse de hockey

Ce simple guide d'introduction de cathéter et dilatateur de veine rend l'introduction de cathéters dans de petits vaisseaux simple et aisée. Il maintient le vaisseau ouvert pendant la procédure d'insertion du cathéter (dénudation).

L'extrémité conique du dilatateur de veine est insérée dans une incision faite aux microciseaux ou à l'aiguille. Le cathéter glisse ensuite facilement dans le vaisseau en plaçant l'extrémité du cathéter dans la partie rainurée sous le dilatateur de veine. Le dilatateur de veine est ensuite retiré et le cathéter est avancé dans la position souhaitée.



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be