



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Contrafluran™ - Filtre



Caractéristiques

Le filtre breveté de piégeage de gaz anesthésiant Contrafluran™ se compose de matériaux solides qui se distinguent par leur structure granuleuse brute, leur vaste surface et leur microporosité élevée.

Cette structure interne hautement poreuse adsorbe et retient efficacement les composants de gaz anesthésiant de manière sélective depuis les gaz exhalés ou les gaz anesthésiants non utilisés tandis qu'ils traversent le filtre.

La capacité de stockage du filtre de piégeage de gaz anesthésiant Contrafluran™ est d'environ 400 g, et la résistance à l'écoulement, avec une valeur $\leq 1,5$ mm CE, est **TRÈS FAIBLE !**

LED holder for contraflurane filter

Le filtre peut être facilement fixé au support du débitmètre/vaporisateur ou sur un rail séparé avec l'aide du SENSOfluran™, une attache intégrée avec UNITÉ DE CONTRÔLE DE NIVEAU DE REMPLISSAGE visuel.

Les LED de différentes couleurs (vert, jaune, rouge) de l'attache SENSOfluran™ indiquent la qualité du gaz filtré expiré, et donc le niveau de remplissage du filtre.

 LED :



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Le filtre nettoie le gaz expiré et dispose toujours d'une capacité suffisante.

LED :

La capacité du filtre diminue. Il est recommandé de remplacer le filtre lorsque la seconde LED jaune s'allume.

LED :

La capacité du filtre est épuisée. Le filtre usagé doit être remplacé par un nouveau.

Pour des raisons légales, l'équipement doit être envoyé à UNO dans une période de 12 mois pour calibration.



Numéro de commande

| Numéro de commande | Produit | Poids | Capacité de stockage | Résistance à l'écoulement | Volume |
|--------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|--------|
| 180000138 | Contraflurane Filter | environ 400gr | environ 1.000 gr | ≤ 1,5 mm CE | 2L |
| 180000139 | LED holder for contraflurane filter | / | / | / | / |



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be