



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Oxymètre de pouls (sensors)



Sensors

Purelight Vet sensors produce the pure light spectrum which eliminates variations in readings from animal-to-animal and sensor-to-sensor.

2000SL -Clip-on sensor for tongue applications, paw pads, and well-vascularized areas.

2000T -For placement on the underside base of the tail or other well-vascularized surfaces.

2000SA -Wrap sensor for placement on the toe (large animal) or base of the tail or foot (small animal).

Placement du capteur

Capteur 2000SL À pince linguale

Est pratique pour les vérifications ponctuelles et la surveillance pendant le rétablissement tandis que l'animal est immobile. Cependant, le capteur est maintenu en place par une légère pression de ressort, qui peut lui permettre d'être délogé par un mouvement. De plus, au fil du temps, la légère pression de ressort peut interférer avec le flux sanguin, entraînant une perte de signal et la nécessité de repositionner le capteur. Le 2000SL est plus facilement mis en place sur la patte arrière, mais la patte avant et la queue peuvent également être utilisées. Pour les souris, il vaut mieux placer le capteur haut dans l'aîne.



Le Capteur 2000T À transflexion

Est également adapté à la surveillance continue. C'est le plus petit capteur de la gamme. Il peut être appliqué sur la patte arrière ou avant, ou sur la surface ventrale de la queue du rat. Il se fixe avec du ruban adhésif.



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Le Capteur 2000SA Á bande pour petits animaux

Se fixe facilement et est moins sujet aux déplacements accidentels, ce qui en fait l'option idéale pour une surveillance continue pendant les procédures chirurgicales de longue durée ou autres. Un ruban adhésif, une bande cohésive ou une bande Posey peuvent être utilisés pour garantir que les diodes du capteur sont alignées directement en face les unes des autres et que toute pression excessive est évitée. Le 2000SA ne doit pas être appliqué sur des zones couvertes de poils ou très pigmentées.



Numéro de commande

2000SL	Sensor Lingual clip Sensor
2000T	Transflectance sensor
2000SA	Small Animal Wrap



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be